

Kundjournal

DE NYA HÅLEN PLACERADES HÄR:



Fyll i kundjournalen och övre delen av skötselrådet. Riv av och ge kunden det skriftliga skötselrådet. Kunden godkänner villkoren genom att signera på denna kundjournal, vilken sedan arkiveras.

ÖRONHÅLTAGNINGEN UTFÖRD:

DATUM

AV

STER LOT

ART NR/REF

Jag har fått ett skriftligt skötselråd och jag godkänner härmed villkoren i detta, samt samtycker till att mina personuppgifter sparas i max 1 år p g a produktpårbarhet.

KUNDENS/MÅLSMANS UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EMAIL

MOBIL



7 330981 340264

ART NR 301-0101 REV 13 (2021:1)

Skötselråd

DATUM FÖR HÅLTAGNINGEN

TID OCH PLATS FÖR ÅTERBESÖK

VILLKOR:

- Jag är minst 18 år. Om inte, ska målsman godkänna villkoren.
- Jag/minderårig är fullt frisk och har inte några åkommor som gör att man bör avstå från öronhåltagning.
- Blomdahl håltagningsörhängen är utvecklade i samråd med hudläkare, för att passa alla. Även dig som redan har nickelallergi. Du väljer mellan noga utvald medicinsk plast (0 % nickel) och ren medicinsk titan. Ytbeläggningen finns enbart på de delar av örhänget som inte kommer i kontakt med huden. Håltagningsörhängena är dessutom designade för bästa läkning.
- Medicinsk håltagning från Blomdahl bygger på modern, aseptisk teknik från sjukvården. Det innebär att produkter och metoder är utformade för att undvika spridning av infektioner vid själva håltagningstillfället. Jag är dock medveten om att hålen efter håltagningstillfället är mitt eget/målsmans ansvar. Ett nyttigt hål i örat är ett litet sår. Därför är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt under läkningsperioden, så att det inte blir infekterat. Genom att följa skötselrådet minimerar jag risken för infektion.



BLOMDAHL
medical beauty

www.blomdahl.se

SKÖTSELRÅD – VIKTIG INFORMATION

1. Vidrör aldrig öronen med orena händer.
2. Rengör de nytagna hålen i öronen (fram- och baksidan) noggrant, morgon och kväll. Låt örhängena sitta i, även vid rengöring.
 - Vid dusch/hårtvätt, använd flytande tvål och skölj noga med rinnande rent vatten. Torka torrt med rent papper eller ren tops.
 - Övrig rengöring görs med Blomdahl Piercing Aftercare, rengöringsservetter, som är skonsamma mot huden. Med dessa kommer du åt att rengöra mellan öra och smycke/lås. Låt lufttorka. Använd en ny servett per öra och rengöringstillfälle. Obs! Rengör inte med sprit/alkohol.
3. Se till att det alltid är rent, torrt och luftigt runt de nytagna hålen.
4. Täck öronen när du använder hårspray, parfym, smink, hårfärgningsmedel m m.
5. Var extra försiktig när du drar kläder över huvudet så att örhängena inte fastnar i kläderna.
6. Vid bad i bassäng, sjö eller hav: Vänta med att bada så länge som möjligt och undvik att ha huvudet under vattnet. Efter bad, rengör antingen med flytande tvål eller Blomdahl Piercing Aftercare, rengöringsservetter – se punkt 2 ovan.



7. **Efter ca 6 veckor (ca 12 veckor för brosk) kan du byta till andra örhängen. Så här tar man bort håltagningsörhänget:** Tvätta händer och öron noggrant. Ta tag i smykesdelen på örats framsida. Ta även tag i låset på örats baksida, med andra handen. Vicka sedan låset bestämt fram och tillbaka tills det lossnar. Ta försiktigt ut håltagningsörhänget och sätt i rena örhängen.
8. Det tar upp till ett år innan hålen är helt läkta, så tänk på följande:
 - Var aldrig utan örhängen, eftersom hålen kan krympa och/eller växa igen.
 - Var försiktig vid byte av örhängen. Eftersom huden som har bildats inuti hålen är tunn och skör, är det lätt att den skadas och att det uppstår en infektion. Rengör därför örhängen och händer innan bytet, samt fortsätt hålla rent, torrt och luftigt runt hålen. Om du använder örhängen med lås, bör låsen inte tryckas tätt mot örats baksida.
 - Risken för att utveckla kontaktallergi är som störst under det första året. Därför bör du vara extra noggrann i ditt val av örhängen. Vi rekommenderar hudvänliga smycken från Blomdahl – se skötselrådets baksida.

VIKTIGT! Rodnad och/eller svullnad och/eller smärta och/eller utslag kan tyda på infektion: Om hålet är i den mjuka delen av örat, den s k örsnibben, ta ut örhänget och tvätta rent. Om det inte börjat bli bättre när du vaknar nästa dag, kontakta läkare. Om hålet är i örats brosk, ta ut örhänget, tvätta rent och kontakta läkare omedelbart.

Se fler frågor och svar på www.blomdahl.se

NOTERINGAR:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



BLOMDAHL
medical beauty



TYCKER DU OM **VACKRA SMYCKEN?**

Det gör vi också.

Vi tycker dessutom att du ska kunna bära vackra smycken utan oro för kontaktallergier.

Och att dina barn eller barnbarn ska ha samma möjlighet.

Det är därför Blomdahl finns.

Vill man vara fin får man lida pin, sägs det. Det tycker vi är en ganska vansinnig tanke.

Varför ska man behöva riskera sin hälsa för skönhetsens skull?

Nickelallergi är en obotlig kontaktallergi som kan utvecklas när som helst i livet,

till exempel om man använder smycken med nickel i.

En håltagning i örat gör huden extra känslig och risken för allergi är som störst under det första året. I samråd med hudläkare har Blomdahl därför utvecklat bevisat snälla örhängen som passar alla och särskilt dig som precis har tagit hål i öronen.

Att göra vackra smycken är en konst. Att göra vackra smycken som tar hänsyn till din hälsa är ännu svårare. Det kräver ambitiös produktutveckling, noggrannhet och oberoende kvalitetskontroller. Alla klarar inte det, utan kompromissar med hudvänligheten.

Vi kommer aldrig att kompromissa. Våra smycken ska alltid vara både vackra och säkra.

Blomdahl är ett tryggt sätt att vara fin varje dag.



BLOMDAHL
medical beauty

www.blomdahl.se



Made in Sweden