



Kunde- journal

Udfyld kundejournalen og den øverste del af plejerådet. Riv slippen af og giv kunden det skriftlige plejeråd. Kunden godkender vilkårene ved at signere denne kundejournal, som du herefter arkiverer.

NÆSEPIERCING FORETAGET:

.....

DATO AF

.....

STER. LOT. ART. NR./REF

Jeg har modtaget skriftlige plejeråd, og jeg godkender hermed betingelserne i disse og bekræfter, at der ikke er helbredsmaessige forhindringer (se bagsiden af plejerådene) for at jeg kan gennemføre næsepiercingen. Jeg accepterer, at mine personlige oplysninger gemmes i 1 år grundet hensynet til produktsporbarhed.



7 330981 340424

.....

KUNDENS/VÆRGES UNDERSKRIFT

.....

NAVN MED BLOKBOGSTAVER

.....

E-MAIL

MOBIL



Plejeråd

.....

DATO FOR PIERCING

DATO FOR GENBESØG

STER. LOT.

ART. NR./REF

VILKØR:

- Jeg er mindst 18 år. Hvis dette ikke er tilfældet skal en væрге godkende vilkårene.
- Jeg/en mindreårig har ingen helbredsmaessige forhindringer, (se bagsiden af plejerådene), som betyder, at man bør undlade at foretage en næsepiercing.
- Blomdahl piercingsmykker er udviklede i samarbejde med hudlæger, så de passer til alle, selv til dig som allerede har nikkelallergi. Du vælger mellem nøje udvalgt medicinsk plastik (0% nikkel) og ren medicinsk titan. Yderbelægningen findes udelukkende på de områder af smykket, som ikke er i kontakt med huden. Piercingsmykkerne er desuden designet med henblik på at opnå det bedste helingsresultat.
- Medicinsk piercing fra Blomdahl bygger på en moderne aseptisk teknik fra sundhedsvæsenet, hvilket indebærer, at produkter og metoder er udviklede, så der undgås spredning af infektioner ved selve piercingen. Jeg er dog medvidende om, at hullet efter piercingprocessen er mit eget/værges ansvar. Et nylavet hul i næsen er et lille sår. Derfor er det vigtigt at tage rigtigt hånd om det under selve helingsperioden, så der ikke opstår infektion. Ved at følge plejerådene minimerer jeg risikoen for infektion.



BLOMDAHL

www.blomdahl.dk

PLEJERÅD - VIGTIG INFORMATION

1. Rør aldrig næsesmykket med urene hænder. Pil aldrig indeni næsen.
2. Rengør dine nylavede huller på næsens yderside både morgen og aften. Lad næsesmykket sidde i selv ved rengøring. Rengør med flydende sæbe, og skyl grundigt med rindende, rent vand. Tør af med rent papir eller en ren vatpind. Alternativt kan du rengøre med Blomdahl Piercing Aftercare rengøringsservietter, som er skånsomme mod huden. Med disse kan du rengøre mellem hud på næsens yderside og smykke. Lad lufttørre. Anvend en ny serviet ved hver rengøring.
3. Sørg for, at der altid er rent, tørt og luftigt omkring det nylavede hul.
4. Dæk næsen til når du bruger sminke, parfume m.m.
5. Der findes ikke en lås inde i næsen, kun en olivenformet spids, som gør at næsesmykket ikke glider ud under helingsprocessen. Næsesmykket kan dog forsøge at glide ud alt afhængig af, hvor meget hævelse der finder sted indeni næsen. I tilfælde af dette skal du med rengjorte hænder trykke smykket tilbage med din finger. Vær ekstra forsigtig, når du tager tøj over hovedet, når du vasker og tørrer dig i ansigtet og når du snuser op. Der anbefales at ligge et plaster over næsesmykket, når du sover for at beskytte dette.
6. Du bør undgå aktiviteter som kan føre til slag mod næsen eftersom du har en spids siddende indeni næsen.



7. Hvis du bader i bassin, sø eller hav: Vent med at bade så længe som muligt og undgå at have hovedet under vandet. Efter bad rengøres enten med flydende sæbe og afskylning med rent vand, eller brug Blomdahl Piercing Aftercare rengøringsservietter – se punkt 2 herover.
8. **Efter ca 4 uger kan du skifte til et normalt næsesmykke.** Vask hænder og næsens yderside grundigt. Tag forsigtigt piercingsmykket ud og sæt et rent næsesmykke i.
9. Det tager op til et år inden hullet er helet fuldstændigt, så vær opmærksom på følgende:
 - Gå ikke uden et smykke i næsen, da hullet kan krympe og/eller vokse sammen igen.
 - Vær forsigtig når du skifter næsesmykke. Eftersom den nydannede hud indeni hullet er tynd og skrøbelig, har den let ved at blive beskadiget og der kan derfor let opstå infektion. Rengør derfor altid næsesmykket og dine hænder inden du skifter, og fortsat med at holde hullet rent, tørt og luftigt.
 - Risikoen for at udvikle kontaktallergi er størst under det første år efter piercingen. Du bør derfor også være ekstra opmærksom i dit valg af næsesmykke. Vi anbefaler hudvenlige smykker fra Blomdahl – se plejerådets bagside.
 - Fortsæt med at rengøre, og kontroller med jævne mellemrum dit hul gennem hele det første år.

VIGTIGT! Rødme, hævelse, smerte eller udslæt kan være tegn på infektion: Tag smykket ud og vask samt tag kontakt til din læge med det samme. Sæt ikke næsesmykket i igen, men lad hullet hele.

Se flere spørgsmål og svar (FAQ) på www.blomdahl.dk

Jeg er opmærksom på, at jeg bør rådføre mig med min læge, før jeg får piercet min næse, hvis jeg fx har en af følgende tilstande:

- kontaktallergi
- hudsygdom eller eksem, fx psoriasis
- diabetes
- sår med infektion
- tidligere problemer med sårheling/keloiddannelse
- hjertesygdom eller medfødt hjertefejl
- bærer kendt resistens mod antibiotika, fx MRSA
- tilhører en immunsvag gruppe (inkl. gravide)
- har et implantat/protese

- koagulationsforstyrrelser/tilbøjelighed til blødning/bruger blodfortyndende medicin
- højt eller lavt blodtryk
- epilepsi eller anden neurologisk sygdom
- hepatitis B, C eller HIV

Ved midlertidig infektion/inflammation i kroppen bør du vente med at blive piercet, til du er rask igen.

Jeg er opmærksom på, at jeg bør rådføre mig med min læge, før jeg får piercet min næse, hvis jeg fx har en af følgende tilstande:

- kontaktallergi
- hudsygdom eller eksem, fx psoriasis
- diabetes
- sår med infektion
- tidligere problemer med sårheling/keloiddannelse
- hjertesygdom eller medfødt hjertefejl
- bærer kendt resistens mod antibiotika, fx MRSA
- tilhører en immunsvag gruppe (inkl. gravide)
- har et implantat/protese

- koagulationsforstyrrelser/tilbøjelighed til blødning/bruger blodfortyndende medicin
- højt eller lavt blodtryk
- epilepsi eller anden neurologisk sygdom
- hepatitis B, C eller HIV

Ved midlertidig infektion/inflammation i kroppen bør du vente med at blive piercet, til du er rask igen.

Smykker, der får dig til at føle dig godt tilpas

Vi hos Blomdahl synes, at alle skal kunne føle sig smukke hver dag. Derfor går vi længere end de fleste og går ekstra meget op i de små detaljer, der gør en stor forskel.

Fra materialer, der er skånsomme mod huden til samvittighedsfuld fremstilling og kvalitet, der holder til det liv, du ønsker at leve. Vi er så omhyggelige med, hvad vi arbejder med, at alle, også dig med hud, der har brug for ekstra omsorg, kan bære smykker fra Blomdahl. Det eneste, du skal tænke på, er, hvad du synes er smukt. For du kan være helt sikker på, at vi allerede har tænkt på alt det andet. Det er en omsorg, du kan glæde dig over, både til hverdag og til fests.



Nemt at rengøre

Hold din nypiercede næse ren ved at bruge Blomdahl Piercing Aftercare rengøringssservietter:

- Nemme at bruge
- Nemt at rengøre mellem næse og smykke
- Skånsomme mod huden
- Helt fri for alkohol

Digitale plejeråd



BLOMDAHL
FEELGOOD JEWELLERY

www.blomdahl.dk

MADE IN SWEDEN



YouTube